

AMERIGEL®



INSTRUCCIONES

Para Después De La Cirugía De Uñas



AMERIGEL® HYDROGEL WOUND DRESSING

QUITAR EL VENDAJE QUIRÚRGICO

Comenzando el día después de la cirugía, quítese con cuidado el apósito y dúchese o báñese normalmente. Si la gasa o el vendaje se adhiere al área, humedezca con agua o dúchese / báñese con el vendaje en su lugar. Esto hará que sea más fácil de quitar con una mínima o ninguna molestia.

PASO 1: APLICACIÓN DEL AMERIGEL HYDROGEL WOUND DRESSING

Después de ducharse o bañarse, seque el sitio quirúrgico (lecho ungueal) y aplique una cantidad generosa de AMERIGEL Hydrogel Wound Dressing. Puede producirse escozor y es normal.

PASO 2: APLICAR GAZA

Corte un trozo de gasa del tamaño adecuado para que se ajuste directamente a toda el área quirúrgica..

PASO 3: APLICAR EL VENDAJE

Asegure la gasa en su lugar con una venda de tela. **IMPORTANTE:** El vendaje debe aplicarse alrededor del dedo del pie en forma de anillo. Al vestir un dedo del pie, aplique el vendaje sin apretar.

EL VENDAJE SE DEBE CAMBIAR UNA VEZ DIARIAMENTE DESPUÉS DEL BAÑO.

INFORMACIÓN GENERAL

Manténgase alejado de sus pies tanto como sea posible hoy. Puede usar cualquier zapato, sandalia o calzado con puntera abierta que no apriete, apriete ni ejerza presión sobre la punta(s). Es posible que los dedos de sus pies permanezcan adormecidos hasta 6 a 10 horas después del procedimiento. Comuníquese con nuestra oficina si tiene alguna pregunta o inquietud.


SANGRADO

Son normales un ligero sangrado, decoloración y supuración.


MALESTAR

Puede elevar el pie para ayudar a aliviar la hinchazón, el sangrado y las molestias leves. También puede tomar aspirina, Tylenol® u otros analgésicos de venta libre según las indicaciones. Si el dolor o la incomodidad no se controlan adecuadamente, comuníquese con nuestra oficina.


PASO 1

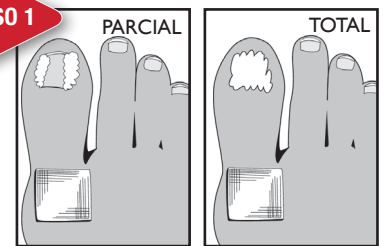

PASO 2

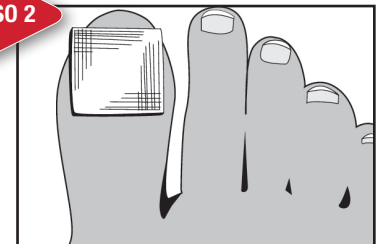

PASO 3

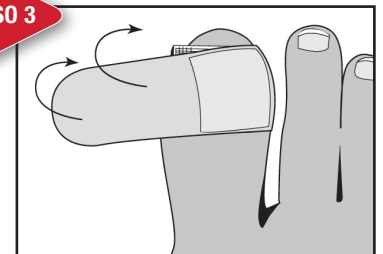

PARA CUALQUIER PREGUNTA O INQUIETUD, CONTACTE A SU MÉDICO

Su próxima visita programada:

Fecha: _____

Hora: _____ **AM / PM**

*Atención:
Coloque la tarjeta de presentación aquí
antes de hacer copias.*