

AMERIGEL®



INSTRUCCIONES

Para Después De La Cirugía De Uñas



AMERIGEL® Kit Quirúrgico Post Operatorio - 1" x 3" Vendaje de Tela

QUITARSE EL VENDAJE QUIRÚRGICO

Al día siguiente de la cirugía, retire con cuidado el vendaje y dúchese o báñese normalmente. Si la gasa o el vendaje se adhieren al área, humedezca con AMERIGEL Saline Wound Wash, agua o dúchese / báñese con el vendaje en su lugar para minimizar las molestias durante la extracción.

PASO 1: LIMPIEZA DE LA HERIDA

Después de ducharse o bañarse, limpie el sitio de la cirugía con AMERIGEL Saline Wound Wash. La acción presurizada del Wound Wash solo requiere una pequeña cantidad de aerosol para limpiar la herida. Para controlar el flujo, presione la boquilla hacia abajo y suéltela rápidamente. Seque el área.

PASO 2: APLICACIÓN DEL APÓSITO PARA HERIDAS AMERIGEL HYDROGEL

Aplique una capa de AMERIGEL Hydrogel Wound Dressing como se muestra en la imagen del Paso 2.

PASO 3: APLICAR GASAS

Coloque 1-2 piezas de gasa directamente sobre el sitio quirúrgico como se muestra en la imagen del Paso 3.

PASO 4: APLICAR EL VENDAJE

Asegure la gasa en su lugar con una venda de tela. **IMPORTANTE:** El vendaje debe aplicarse alrededor del dedo del pie en forma de anillo. (Imagen del paso 4). Evite aplicar presión excesiva al asegurar la gasa en su lugar con el vendaje.


CAMBIAR SU VESTIMENTA UNA VEZ AL DÍA

INFORMACIÓN GENERAL


Manténgase alejado de sus pies tanto como sea posible hoy. Puede usar cualquier zapato, sandalia o calzado con puntera abierta que no apriete, ni ejerza presión sobre la punta(s). Es posible que los dedos de sus pies permanezcan adormecidos hasta 6 a 10 horas después del procedimiento. Comuníquese con nuestra oficina si tiene alguna pregunta o inquietud.

- **Sangrado:** Sangrado leve, decoloración y supuración son normales.
- **Malestar:** Puede elevar el pie para ayudar a aliviar la hinchazón, el sangrado y las molestias leves. También puede tomar aspirina, Tylenol® u otros analgésicos de venta libre según las indicaciones. Si el dolor o la incomodidad no se controlan adecuadamente, comuníquese con nuestra oficina.


PASO 1

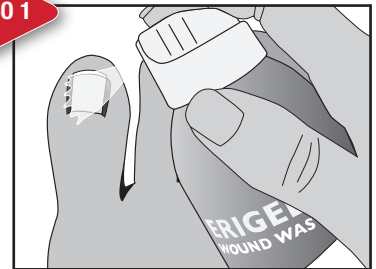


PASO 2

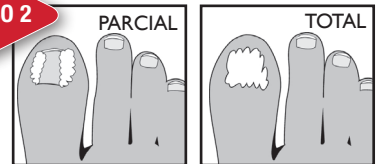

PASO 3

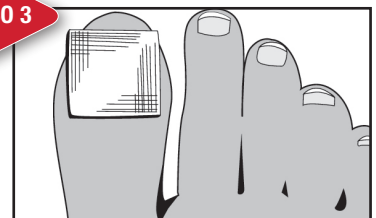

PASO 4

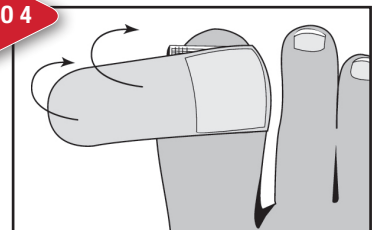

PARA CUALQUIER PREGUNTA O INQUIETUD, CONTACTE A SU MÉDICO

Su próxima visita programada:

Fecha: _____

Hora: _____ **AM / PM**

Atención:

Por favor, coloque la tarjeta de presentación aquí antes de hacer copias.