



INSTRUCCIONES

Para el AMERX[®] Kit del Cuidado de Heridas



FOAM DRESSING

RETIRANDO EL VENDAJE

Retire con cuidado el vendaje / gasa existente que cubre la herida. Para hacer que el vendaje sea más fácil de quitar con poca o ninguna molestia, puede humedecer el vendaje con AMERIGEL[®] Saline Wound Wash. Espere varios minutos y luego remuevalo con cuidado.

PASO 1: LIMPIEZA DE LA HERIDA

Limpie la herida con AMERIGEL Saline Wound Wash rociando el área afectada. El lavado de heridas con presión requiere solo una pequeña cantidad del aerosol para limpiar la herida. Seque suavemente la herida.



PASO 2: APLICACIÓN DE AMERX FOAM DRESSING

Después de la limpieza de la herida, retire el apósito de AMERX Foam del paquete y colóquelo directamente sobre la herida. El vendaje de espuma debe extenderse un mínimo de ¼ de pulgada más allá de los bordes de la herida. Cuidadosamente aplique presión para asegurar el contacto adecuado.

PASO 3: APLICACIÓN AMERX BORDERED GAUZE DRESSING

Retire el apósito de AMERX Bordered Gauze del paquete. Retire un lado del papel. Coloque el vendaje sobre la herida y la piel circundante. Retire el papel restante. Suavemente alise el borde del vendaje para asegurar el contacto adecuado con la piel circundante.

CAMBIE EL APÓSITO CADA 3 DÍAS O SEGÚN LO INDICA SU PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA.

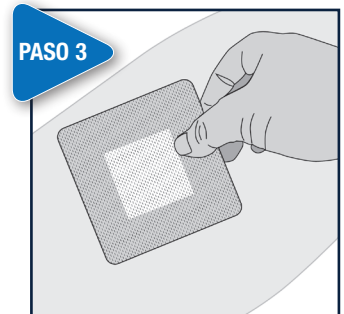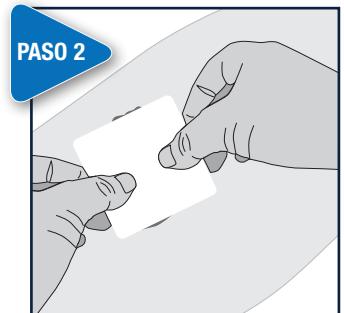

**PARA CUALQUIER PREGUNTA O DUDA,
FAVOR DE COMUNICARSE CON SU MÉDICO**

Atención:
Por favor, coloque la tarjeta de visita
aquí antes de hacer copias.

Su próxima visita de seguimiento es en:

Fecha: _____

Hora: _____ **AM/PM**